

Вход в сервисный режим и проверка приводов прибора

В главном меню прибора :

- Выход

- Выход из системы (Admin)

Далее – находясь в панели – Войти в систему , имя пользователя – Admin

- Нажать темно-синюю кнопку СТАРТ на лиц. Панели прибора

- Admin – смениться на логин – Service

- в поле Пароль – ввести **6484** – Принять


- Далее уже в сервисном меню – кнопка внизу/справа – В начало

- кнопка Обслуживание

- кнопка Troubleshooting

- в следующем меню есть два пункта , которые необходимо будет выбирать для проверки привода диллятора

- сначала выбираем Optos (датчики диллятора)

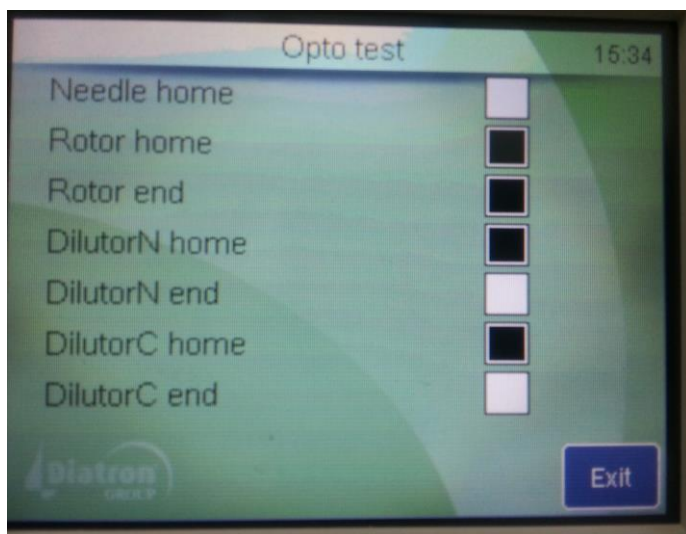

В появившейся панели – ряд индикаторов срабатывания датчиков в системе.

- руками перемещаем вверх –вниз планки привода шприцов в дилляторе (там два независимых привода)

И соответственно наблюдаем, есть ли срабатывания индикаторов у

- Dilutor N home / end

- Dilutor C home/ end

В норме все четыре индикатора должны четко срабатывать на конечные положения (верх/низ) планок со шприцами.

Далее по – Exit – возвращаемся в меню и выбираем пункт – Motors

- Выбираем – Dilutor
- Далее прибор начнет самостоятельно поочередно перемещать оба привода в дилляторе .
Работа привода будет продолжаться непрерывно, пока не будет выполнен выход назад в меню.
Пока привод работает , визуально и на слух оценивается, есть ли проблемы с перемещением, заклинивания, остановки и тому подобное.

В случае обнаружения каких-либо проблем с датчиками положения диллятора и его приводом, далее необходимо снятие с прибора блока диллятора целиком и его ремонт.