



**CAUTION :** Refer to the ultrasound system user manual for important probe care and cleaning instructions.

**ACHTUNG :** Wichtige Hinweise zur Pflege und Reinigung von Schallköpfen finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihres Ultraschallgeräts.

**ATTENTION :** Se reporter au manuel de l'utilisateur de l'échographe pour des instructions concernant la maintenance et le nettoyage de la sonde.

**CUIDADO :** Consultar el Manual del Operador del sistema de ultrasonido para obtener las instrucciones importantes relativas al mantenimiento y limpieza de la sonda.

**CUIDADO :** Consultar o Manual do Usuário do sistema de ultra-sonografia para obter as instruções importantes relativas à manutenção e limpeza do transdutor.

**CAUTELA :** Per le istruzioni relative alla manutenzione e pulizia delle sonde fare riferimento al manuale per l'utente del sistema ultrasuoni.

**小心 :** 请参考超声波系统用户手册，了解详细的有关探头维护和清洗方面的指导信息。

**注意 :** 重要なプローブの手入れ並びにクリーニング手順に関して超音波システムのユーザーマニュアルを参照して下さい。

		AB2-5 AB4-8	AB2-5 (gray lens) AB2-7	AC2-5	SP4-10 SP10-16	SP6-12	PA2-5P	PA4-7 PA6-8 PA2-5	IC5-9	RABA-8P RAB2-5	RSP6-12 RSP5-12	RIC5-9	RRE6-10	SCW2.0	PCW4.0	RAB4-8L RAB2-5L
<b>Aquasonics 100</b>	Gel	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
<b>Sonogel</b>	Gel	OK	OK	OK	⊗	OK	⊗	OK	OK	OK	OK	OK	OK	⊗	⊗	⊗
<b>T-Spray / T-Spray II</b>	Quaternary Ammoniums	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	OK	OK	OK	OK	⊗	⊗	⊗	⊗	OK
<b>Transeptic Spray</b>	70% IPA	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	OK	OK	OK	⊗	OK	⊗	⊗	⊗	⊗
<b>Asepti-Wipes</b>	8%IPA, <1%Quat	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	OK	⊗	OK	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
<b>MetriWipes</b>	8%IPA, <1%Quat	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	OK	⊗	OK	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
<b>Sani-Cloth Germicidal</b>	8%IPA, <1%Quat	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	OK	⊗	OK	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
<b>Sani-Cloth HB</b>	Quaternary Ammoniums	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	⊗	⊗
<b>PeraSafe</b>	Sodium Perborate	⊗	OK	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	OK	OK	OK	OK	OK	⊗	⊗	⊗
<b>Alkazyme</b>	Proteolytic Enzyme	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	OK	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
<b>Cidex</b>	Glutaraldehyde	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	⊗
<b>Cidex OPA</b>	Ortho-phthalaldehyde	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	⊗	⊗	⊗	OK
<b>Cidex Plus</b>	Glutaraldehyde	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	OK	⊗	OK	⊗	⊗	⊗	⊗
<b>Gigasept</b>	Succindialdehyde, formaldehyde	⊗	OK	⊗	⊗	⊗	⊗	OK	⊗	OK	OK	OK	OK	OK	OK	⊗
<b>Gigasept AF</b>	Quaternary Ammoniums	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	OK	OK	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
<b>Gigasept FF</b>	Succindialdehyde	⊗	⊗	⊗	⊗	OK	⊗	OK	OK	OK	OK	OK	OK	⊗	⊗	⊗
<b>Klenzyme</b>	Quat, IPA	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	OK	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
<b>Metricide</b>	Glutaraldehyde	⊗	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	⊗
<b>Sekusept Plus</b>	Nonionic surfactant	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	OK	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
<b>Ster-Bac Blu</b>	Quaternary Ammoniums	⊗	⊗	OK	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	OK	OK	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
<b>Wavicide-01</b>	Glutaraldehyde	⊗	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	⊗

