

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПОЗИЦИИ – АМХ 4/АМХ 4+  
400 – ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  
ПЛЕНКИ/ЭКРАНА – 400**

ЧАСТЬ ТЕЛА	ПОЛОЖЕНИЕ	РАЗМЕР ТЕЛА ПАЦИЕНТА	ПРЕДЛАГАЕТСЯ:		РАССТОЯНИЕ ОТ ИСТОЧНИКА ДО ИЗОБРАЖЕНИЯ
			kVp	ДОЗА	
ГРУДНАЯ КЛЕТКА (БЕЗ РЕШЕТКИ) (ЛАТЕРАЛЬНОЕ ДВОЙНОЕ МАС, +5-10 kVp)	РА/АР, СТОЯ	НЕБОЛЬШОЙ			
		СРЕДНИЙ			
		КРУПНЫЙ			
Руководство по экспозиции также доступно в сервисных центрах компании GE на следующих языках: Français - 46-017216-01 Deutsch - 46-017216-08 Español - 46-017216-06 Italiano - 46-017216-11 Portugues - 46-017216-27 日本語 - 46-017216-40 简体中文 - 46-017216-41	АР, СТОЯ	НЕБОЛЬШОЙ			
		СРЕДНИЙ			
		КРУПНЫЙ			
	АР, ЛЕЖА	НЕБОЛЬШОЙ			
		СРЕДНИЙ			
		КРУПНЫЙ			
ГРУДНАЯ КЛЕТКА, НОВОРОЖДЕННЫЙ	АР				
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ				
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ	АР, С РЕШЕТКОЙ*	СРЕДНИЙ			
ЛОДЫЖКА	АР	СРЕДНИЙ			
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ	СРЕДНИЙ			
ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА	АР*	СРЕДНИЙ			
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ/ВЫТЯНУТОЕ	СРЕДНИЙ			
ЛОКОТЬ	АР	СРЕДНИЙ			
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ	СРЕДНИЙ			
БЕДРО	АР/ЛАТЕРАЛЬНОЕ	СРЕДНИЙ			
СТУПНЯ	АР	СРЕДНИЙ			
КИСТЬ/ЗАПЯСТЬЕ	РА	СРЕДНИЙ			
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ	СРЕДНИЙ			
ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ	АР/ЛАТЕРАЛЬНОЕ	СРЕДНИЙ			
	АР	СРЕДНИЙ			
КОЛЕНА	ЛАТЕРАЛЬНОЕ	СРЕДНИЙ			
	АР, С РЕШЕТКОЙ*	СРЕДНИЙ			
ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА	ЛАТЕРАЛЬНОЕ, С РЕШЕТКОЙ*	СРЕДНИЙ			
	АР, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ			
ТАЗ/БЕДРО	АР, С РЕШЕТКОЙ*	СРЕДНИЙ			
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ, С РЕШЕТКОЙ*	СРЕДНИЙ			
	АР, С РЕШЕТКОЙ*	СРЕДНИЙ			
ПЛЕЧО/КЛЮЧИЦА	АР	СРЕДНИЙ			
ЧЕРЕП	АР	СРЕДНИЙ			
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ	СРЕДНИЙ			
	АР, С РЕШЕТКОЙ*	СРЕДНИЙ			
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ, С РЕШЕТКОЙ*	СРЕДНИЙ			
ГРУДНОЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА	АР	СРЕДНИЙ			
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ, С РЕШЕТКОЙ*	СРЕДНИЙ			
БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ КОСТЬ-МАЛОБЕРЦОВАЯ КОСТЬ	АР/ЛАТЕРАЛЬНОЕ	СРЕДНИЙ			

\*ОЗНАЧАЕТ, ЧТО РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТЕХНИКА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ СООТНОШЕНИЯ 1:10, РЕШЕТКА 150 ЛИНИЙ НА ДЮЙМ (LPI).



GE Medical Systems

ИЗЛУЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАПРАВЛЕНО НА УЧАСТОК РАЗМЕРОМ НЕ БОЛЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПЛЕНКИ.

ПРЯМОЙ НОМЕР 46-017216-RU  
РЕДАКЦИЯ 8 - 6/8/06

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПОЗИЦИИ – АМХ 4/АМХ 4+  
400 – ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  
ЭКРАНА/ПЛЕНКИ – 400**

ЧАСТЬ ТЕЛА	ПОЛОЖЕНИЕ	РАЗМЕР ТЕЛА ПАЦИЕНТА	ПРЕДЛАГА ЕТСЯ:		РАССТОЯНИЕ ОТ ИСТОЧНИКА ДО ИЗОБРАЖЕНИЯ
			kVp	мАс ДОЗА	
ГРУДНАЯ КЛЕТКА (БЕЗ РЕШЕТКИ) (ЛАТЕРАЛЬНОЕ ДВОЙНОЕ МАС, +5-10 kVp)	РА/АР, СТОЯ	НЕБОЛЬШОЙ	80	2,5	72 дюйма (1,8 м)
	ЭКРАН	СРЕДНИЙ	85	4	72 дюйма (1,8 м)
		КРУПНЫЙ	90	6	72 дюйма (1,8 м)
		НЕБОЛЬШОЙ	70	2,5	40 дюймов (1,0 м)
	АР, СТОЯ ЭКРАН	СРЕДНИЙ	75	4	40 дюймов (1,0 м)
		КРУПНЫЙ	85	4	40 дюймов (1,0 м)
НЕБОЛЬШОЙ		75	2,5	54 дюйма (1,4 м)	
АР, ЛЕЖА ЭКРАН	СРЕДНИЙ	80	4	54 дюйма (1,4 м)	
	КРУПНЫЙ	85	4	54 дюйма (1,4 м)	
	АР, С ЭКРАНОМ		65	0,64	40 дюймов (1,0 м)
ГРУДНАЯ КЛЕТКА, НОВОРОЖДЕННЫЙ	ЛАТЕРАЛЬНОЕ, С ЭКРАНОМ		65- 70	1,25	40 дюймов (1,0 м)
	БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ	АР, С РЕШЕТКОЙ*	СРЕДНИЙ	70	80
ЛОДЫЖКА	АР, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	55	3,2	40 дюймов (1,0 м)
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	55	2,5	40 дюймов (1,0 м)
ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА	АР*, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	60	10	40 дюймов (1,0 м)
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	65	16	72 дюйма (1,8 м)
ЛОКОТЬ	АР, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	55	4	40 дюймов (1,0 м)
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	60	4	40 дюймов (1,0 м)
БЕДРО	АР/ЛАТЕРАЛЬ НОЕ, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	55	12,5	40 дюймов (1,0 м)
СТУПНЯ	АР, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	52	2	40 дюймов (1,0 м)
КИСТЬ/ЗАПЯСТЬЕ	РА, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	50	1,25	40 дюймов (1,0 м)
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	55	2	40 дюймов (1,0 м)
ПЛЕЧЕВАЯ КОСТЬ	АР/ЛАТЕРАЛЬ НОЕ, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	55	6,4	40 дюймов (1,0 м)
КОЛЕНО	АР, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	55	6,4	40 дюймов (1,0 м)
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	55	4	40 дюймов (1,0 м)
ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА	АР, С РЕШЕТКОЙ*	СРЕДНИЙ	75	64	44 дюйма (1,1 м)
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ, С РЕШЕТКОЙ*	СРЕДНИЙ	85	175	44 дюйма (1,1 м)
ТАЗ/БЕДРО	АР, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	65	32	40 дюймов (1,0 м)
	АР, С РЕШЕТКОЙ*	СРЕДНИЙ	70	80	40 дюймов (1,0 м)
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ, С РЕШЕТКОЙ*	СРЕДНИЙ	80	85	44 дюйма (1,1 м)
ПЛЕЧО/КЛЮЧИЦА	АР, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	55	6,4	40 дюймов (1,0 м)
ЧЕРЕП	АР, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	60	20	40 дюймов (1,0 м)
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	55	12,5	40 дюймов (1,0 м)
	АР, С РЕШЕТКОЙ*	СРЕДНИЙ	75	25	40 дюймов (1,0 м)
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ, С РЕШЕТКОЙ*	СРЕДНИЙ	65	12,5	40 дюймов (1,0 м)
ГРУДНОЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА	АР, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	65	20	40 дюймов (1,0 м)
	ЛАТЕРАЛЬНОЕ, С РЕШЕТКОЙ*	СРЕДНИЙ	80	125	44 дюйма (1,1 м)
БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ КОСТЬ- МАЛОБЕРЦОВАЯ КОСТЬ	АР/ ЛАТЕРАЛЬНОЕ, С ЭКРАНОМ	СРЕДНИЙ	55	5	40 дюймов (1,0 м)

\*ОЗНАЧАЕТ, ЧТО РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТЕХНИКА  
ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ СООТНОШЕНИЯ 1:10,  
РЕШЕТКА 150 ЛИНИЙ НА ДЮЙМ (LPI).



GE Medical Systems

ИЗЛУЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАПРАВЛЕНО НА УЧАСТОК  
РАЗМЕРОМ НЕ БОЛЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПЛЕНКИ.

ПРЯМОЙ НОМЕР 46-017216-RU  
РЕДАКЦИЯ 8 - 6/8/06