
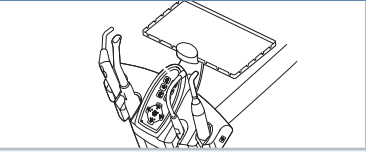
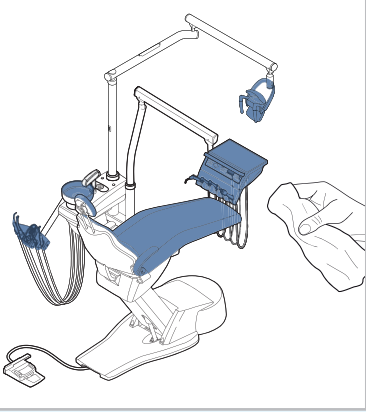
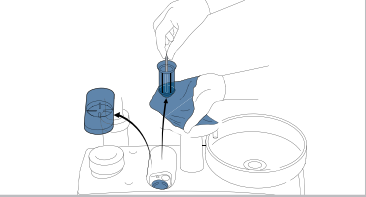
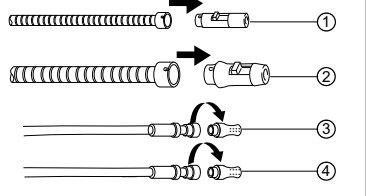
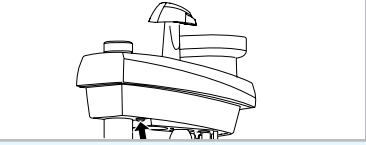


План ухода и чистки

Когда?	Что?	Как?
По утрам 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Промывка шлангов инструментов (внутри) и водопроводящих систем ■ Промывка всасывающих шлангов (внутри) и системы отсоса 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Промывайте все места отбора в течение 2 минут ▶ Прогоните через каждый всасывающий шланг по чашке холодной воды
После каждой процедуры лечения 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Промывка шлангов инструментов (внутри) и водопроводящих систем ■ Промывка всасывающих шлангов (внутри) и системы отсоса ■ Очистка и дезинфекция <ul style="list-style-type: none"> - Всасывающих шлангов (снаружи) и шлангов инструментов (снаружи) - Плевательницы и ситечка - Поверхностей приборов, мягкой обивки и лампы ■ Очистка и дезинфекция <ul style="list-style-type: none"> - Ручек на модуле врача и стоматологической лампы KaVoLUX 540 LED - Ручек стоматологических ламп EDI и MAIA 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Промывайте все места отбора в течение 20 секунд ▶ Прогоните через каждый всасывающий шланг по чашке холодной воды. При необходимости дезинфекции: проведите отсос дозы геля DEKASEPTOL из дозатора ▶ Очистите вручную и дезинфицируйте протиранием ▶ Снимите белые ручки и проведите их термодезинфекцию. Снимите и стерилизуйте серые ручки ▶ Снимите и стерилизуйте ручки
По вечерам  	<ul style="list-style-type: none"> ■ Промывка шлангов инструментов (внутри) и водопроводящих систем ■ Вставок-ситечек ■ Очистка и дезинфекция <ul style="list-style-type: none"> - Всасывающих шлангов (внутри) - Системы отсоса - Плевательницы ■ Всасывающих шлангов (снаружи) и шлангов инструментов (снаружи) ■ Соединительных элементов для всасывающих шлангов 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Промывайте все места отбора в течение 20 секунд ▶ Осмотрите и, при необходимости, замените ▶ Прогоните через каждый всасывающий шланг по чашке холодной воды. Прогоните через каждый всасывающий шланг дозу геля DEKASEPTOL, уложите шланги ▶ Положите дозу геля DEKASEPTOL в плевательницу и почистите ее щеткой ▶ Очистите вручную и дезинфицируйте протиранием ▶ Снимите наконечники ① и ② и проведите их термодезинфекцию, наконечники ③ и ④ продезинфицируйте протиранием
Каждую пятницу и после длительного простоя 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Очистка и дезинфекция <ul style="list-style-type: none"> - шлангов инструментов (внутри) - водопроводящих систем - всасывающих шлангов снаружи - системы отсоса - плевательницы 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Проведите интенсивную ручную стерилизацию. ▶ Прогоните через каждый всасывающий шланг по чашке холодной воды. При необходимости дезинфекции: проведите отсос дозы геля DEKASEPTOL из дозатора ▶ Положите дозу геля DEKASEPTOL в плевательницу и почистите щеткой
При необходимости 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Рециркуляционного фильтра турбины ■ Коврика для укладки инструментов/противоскользящего коврика ■ Опоры стакана для полоскания ■ Подставки для инструментов 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Осмотрите, при необходимости замените и очистите впуск фильтра ▶ Снимите и подвергните термодезинфекции ▶ Снимите, очистите вручную и проведите дезинфекцию протиранием ▶ Снимите, очистите вручную и проведите дезинфекцию протиранием

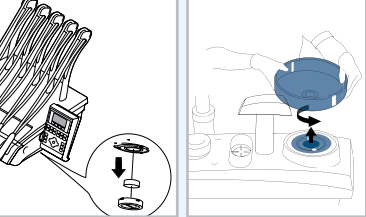

ОСТОРОЖНО

Используйте только те средства дезинфекции, которые были одобрены компанией KaVo!

План ухода и чистки касается только самых необходимых эксплуатационных функций. Он не является заменой поставляемому с оборудованием руководству по эксплуатации, которого следует придерживаться во избежание неисправностей и аварийных случаев.

Разрешенные дезинфицирующие средства:

- MikroZid Liquid (фирма Schülke & Mayr)
- FD 322 (фирма Dürr)
- Incidin Liquid (фирма Ecolab)
- CaviCide (фирма Metrex)



KaVo. Dental Excellence.