



Как создать файл архива с сервисными данными для Abacus 5


Приготовьте USB – Flash диск.

Вставьте его в один из четырех портов USB на задней стенке анализатора.

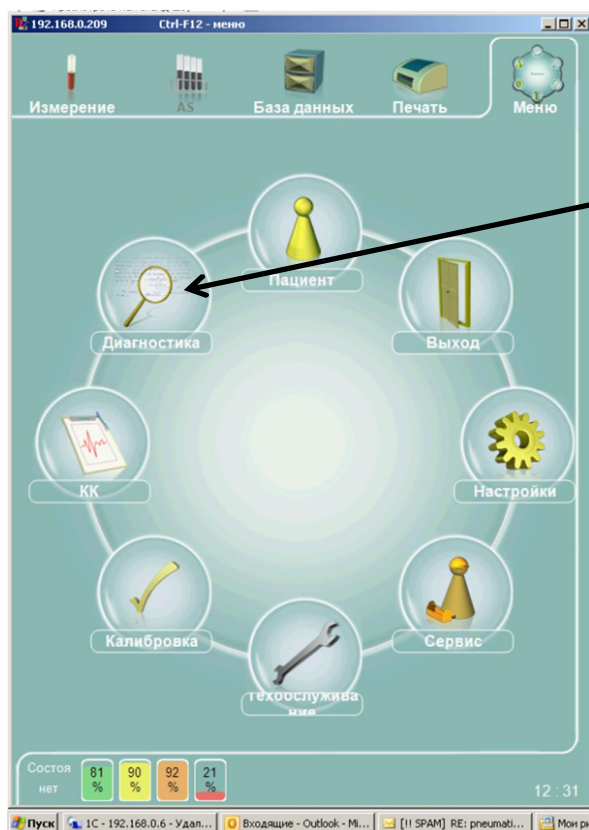

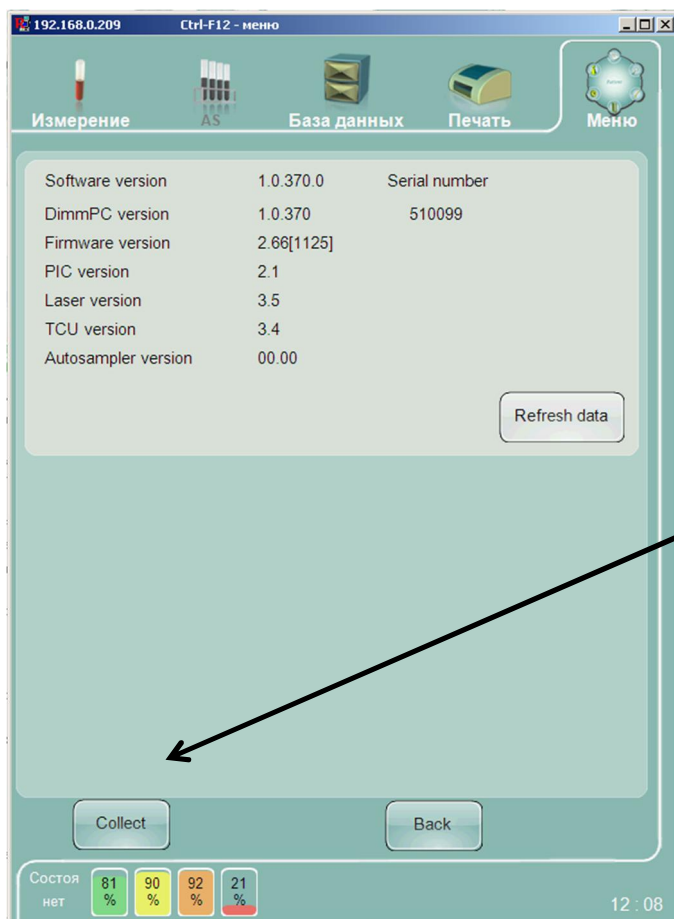

В открывшейся панели IFORMATION - выберите кнопку COLLECT (Собрать) в левом нижнем углу.

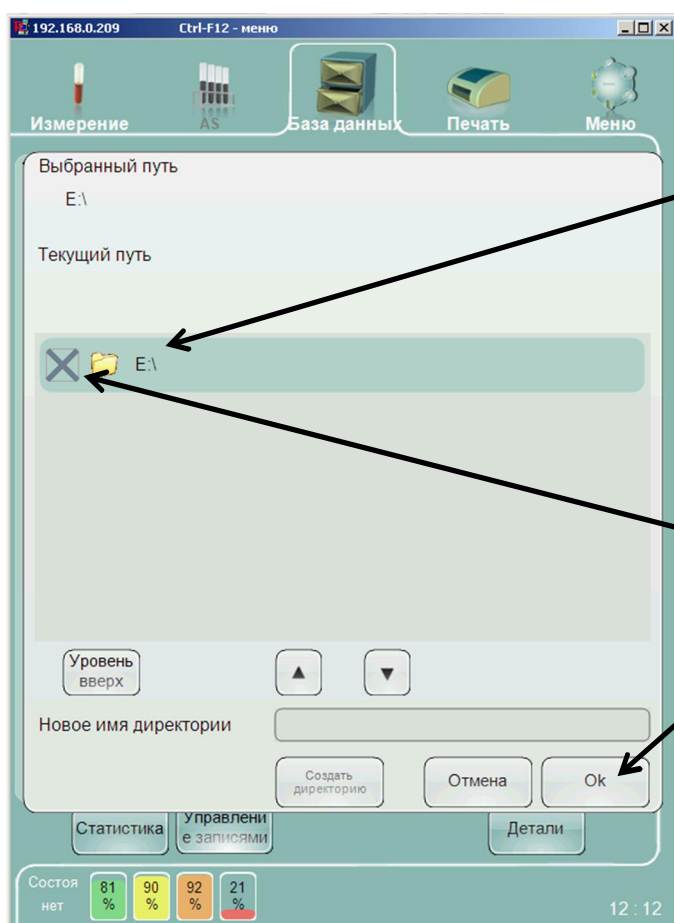

Далее откроется панель – в которой будет показан Flash – диск ,

как диск / папка с именем E;

Необходимо поставить флажок у этого диска и нажать OK

Далее необходимо отключить Flash – диск из разъема на задней панели прибора.

Подключить его к компьютеру с программой электронной почты – E-mail.

Создать и отправить сообщение на адреса:

service@westmedica.com

service.perm@westmedica.com

В сообщение вложить файл архива, записанный на Flash-диске.

Файл архива имеет вид: XXXX-XXXX-XXXX . gz где XXXX – это последовательность разных цифр .

Пример: 2688-1244-3689. gz