

Входные/выходные разъемы и назначение контактов гнезд

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

К входным/выходным гнездам и разъемам подключайте только рекомендуемое оборудование. В противном случае, существует опасность удара током пациента или оператора.

Основной модуль

Гнезда триггера входа/выхода INPUT/OUTPUT TRIGGER



Триггер входа (MAX +5 В, Входное сопротивление 100 кОм)
Триггер выхода (MAX +5 В,
Выходной ток 15 мА)

DG


Используемый разъем: HLJ2308-01-3030 (Code No.: 094497)

Сопрягаемый разъем: P-108 6.3 диам. Стереостекер (Code No.: 092383)

Разъем лампы фотостимуляции PHOTIC LAMP

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Перед подключением или отключением провода фотолампы, выключите электропитание. После выключения питания на разъеме лампы присутствует высокое напряжение около 600 В течение нескольких минут.
- После включения фотолампы напряжение около 600 В имеется на контакте 2 разъема фотолампы PHOTIC LAMP. Для защиты от удара током, всегда оставляйте подключенным провод фотолампы к разъему, даже если фотостимуляция не применяется.

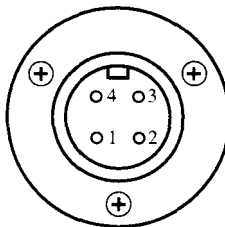

Pin NO.	Сигнал
1	CG
2	Высокое напряжение, 600 V
3	PG
4	Триггер лампы

Используемый разъем: NCS-254-RF (Code No.: 269121)

Сопрягаемый разъем: NCS-254-PM (Code No.: 268782)