

- g) Поместите кюветы в дистиллированную воду из второй емкости на 10-30 минут.
- h) Выньте кюветы из второй емкости и поместите их туда снова. Повторите три раза.
- i) Поместите кюветы в дистиллированную воду из третьей емкости на 10-30 минут.
- j) Выньте кюветы из третьей емкости и поместите их туда снова. Повторите три раза. После промывки высушите кюветы.
- k) Поместите кюветы «вниз головой» на сухом воздухе.
- l) Нагревание запрещено, это может повлиять на качество кювет и результатов исследований.

	Внимание
	Кюветы можно использовать около 50 раз. Затем их необходимо утилизировать, приобрести новые.

7.6 Замена частей аппарата

7.6.1 Замена лампы

В общем случае лампа должна меняться каждые шесть месяцев или после 15000 часов работы.

- a) Откройте заднюю панель.
- b) Выньте защитную панель лампы.
- c) Выньте старую лампу и замените на новую (12V/35W).
- d) Установите защитную панель лампы.
- e) Закройте заднюю крышку.

	Внимание
	Замену лампы можно проводить только когда лампа остыла.

7.6.2 Замена иглы

- a) Откройте правую панель.
- b) Открутите задвижку необходимой иглы, смените иглу и быстро закрутите винт.
- c) Закройте панель.

7.6.3 Замена пробозаборника

Замена пробозаборника необходима только в случае его поломки.

- a) Откройте переднюю панель.