



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МИКРОДВИГАТЕЛИ

Более подробную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации инструментов и приборов - www.bienair.com

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

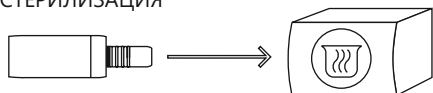

СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ LUBRIFLUID

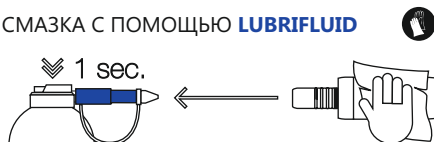


ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ




РУЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ




ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

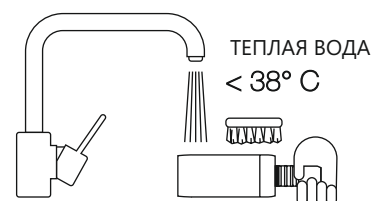

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА AQUACARE

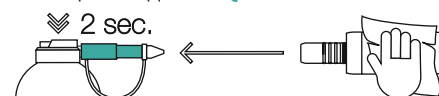

ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА SPRAYNET

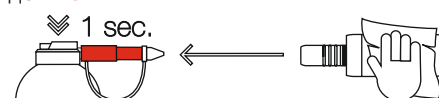

НАРУЖНАЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА SPRAYNET




С УГОЛЬНЫМИ ЩЕТКАМИ

НЕ стерилизуемые микродвигатели

только кожу



ПОДГОТОВКА

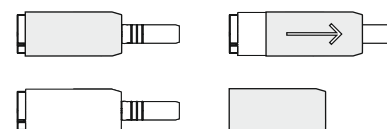

Снятие кожу. У моторов серии MC2 (IR) и MC2 GTAV, кожу для стерилизации отсутствует. Пожалуйста, смотрите руководство по эксплуатации, в ней вы найдете более подробную информацию.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ


ПОДГОТОВКА



Внутренняя предварительная очистка водой



БЕЗЩЕТОЧНЫЙ

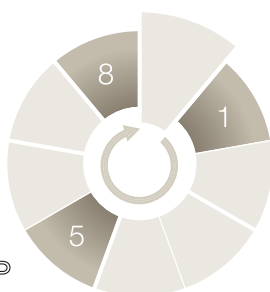

СМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПО УХОДУ НА ОБОРОТЕ (НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ)

СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА МИКРОМОТОРАМИ BIEN AIR



Aquacare

500 мл чистящее средство
в виде спрея, в уп. 6 шт.

для очистки инструментов, используемых с физиологическим раствором
арт. 1600617-001



Spraynet

500 мл чистящее средство
в виде спрея, в уп. 6 шт.

для очистки инструментов и приборов
арт. 1600036-001



Lubrifiuid

500 мл смазочное средство
в виде спрея, в уп. 6 шт.

для турбин, механических наконечников и
моторов серии MX, Basch и Aquilon.
арт. 1600064-001



Чистящая игла

Для прочистки каналов распылителей турбин,
угловых и прямых наконечников.

Идет в комплекте с каждым наконечником
Так же можно приобрести отдельно, в уп. 10 шт
арт. 1000001-010