

8.4 Принтер

8.4.1 Встроенный принтер

Встроенный рулонный принтер входит в состав ABX Micros ES60 ОТ/СТ.

- Встроенный принтер позволяет печатать результаты, таблицы Контроля Качества и ХВ статистику. Вся печать выполняется в градациях серого цвета.

Таб. 1-7 Клавиши принтера

Клавиша	Наименование	Действие
	Feed paper / Протяжка бумаги	Позволяет пользователю загрузить бумагу в принтер
	Self test printer / Само тестирование принтера	Самотестирование принтера выполняется при нажатии двух клавиш одновременно и включении прибора с помощью клавиши ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). После окончания самотестирования нажмите клавишу Feed paper чтобы стартовать принтер.



Встроенный рулонный принтер «понимает» только символы латинского алфавита. Если в распечатках используется другие символы (например, кириллица), необходимо использовать внешний принтер.

8.4.2 Внешний принтер (опция)

Помимо встроенного рулонного принтера может быть установлен и может использоваться внешний принтер. Внешний принтер может использоваться:

- Локально (подключенным к порту USB)
- Совместно (подключенным к лабораторной сети)



Проверять совместимость своего принтера и ABX Micros ES60 ОТ/СТ должен пользователь.

Постоянно пополняемый список принтеров, совместимых с ABX Micros ES60 ОТ/СТ можно посмотреть на сайте <http://www.horiba-abx.com/documentation: Other/printers/instrument printer list/abx micros es60>.

Для уточнения информации, пожалуйста, свяжитесь со Службой Технической Поддержки (Сервисный Центр ЛАБИКС: тел. (495) 234-88-77 (доб 106, 115), e-mail: service@labix.ru)